

## Тренажер дыхательный ПАРИ ПЭД S-System



**Дыхательный тренажер ПАРИ ПЭД S - изменяет положительное давление на выдохе для облегчения отхождения мокроты и тренировки дыхательных мышц.**

Совместим с небулайзерами ПАРИ ЛЦ Спринт и ПАРИ ЛЦ +, и ПАРИ ЛЛ.

### **ПЭД системы – новое решение для сочетания ингаляции и физиотерапии**

- С помощью **ПЭД систем** создается положительное давление на выдохе, что препятствует бронхиальному коллапсу, восстанавливает просвет бронхов и улучшает эвакуацию бронхиального секрета.
- Возможен подбор, контроль и регулирование создаваемого сопротивления на выдохе с помощью манометра.
- Рекомендуется химическая или термическая дезинфекция при индивидуальном использовании и стерилизация в автоклаве при температуре до 137°C в течение 20 минут если система используется несколькими пациентами.
- Лечение с помощью системы ПАРИ ПЭД S может проводиться со всеми небулайзерами ПАРИ.
- При использовании ПЭД систем небулайзер может комплектоваться прерывателем воздушного потока для уменьшения потерь медикамента.

- Может использоваться отдельно, как дыхательный тренажёр для создания изменяемого сопротивления на вдохе или выдохе.
- Смена сопротивления на вдохе или на выдохе производится благодаря изменению положения клапана выдоха.